

# ベッド付属品

## サイドレール・ベッド介助バー

**KA-037B・038B  
サイドサポート**  
コードNo.21150-11・12



(オプション差込式)  
長さ:63cm 厚み:12cm (ボトム取付式)  
ボトム取付式  
長さ:63cm 厚み:21.7cm  
各レンタルは(1本単位)です。  
レンタル価格.....¥500  
利用者負担.....**¥50**

**KQ-91  
立てるんバー**  
コードNo.21201-62

幅135cm～149cm×高さ128cm  
重さ:14kg  
材質:スチールパイプ  
高さ・角度の調節が自由  
ベッド左右を選ばず取り  
付け可能です。  
使い勝手・使う方に合  
わせて微調整できます。  
幅は使用ベッドにより異なります。



レンタル価格.....¥5,000  
利用者負担.....**¥500**

**スタンダード  
ハイロータイプ**  
コードNo.21202-11

幅52cm×高さ(ボトム  
面より)74.5cm～89cm  
<使用ベッドにより異なります>  
重さ:8.0kg  
高さ調整機能付きベ  
ッドに適したハイロータイプ  
です。



レンタル価格.....¥2,000  
利用者負担.....**¥200**

## オーバーベッドテーブル

**KQ-090  
アジャストテーブル**  
コードNo.21251-41




幅57cm×奥行32cm  
レンタル価格.....¥1,000  
利用者負担.....**¥100**

**KQ-060W  
オーバーテーブル**  
コードNo.21251-60




幅99.8cm×奥行31cm  
レンタル価格.....¥1,000  
利用者負担.....**¥100**

**PGT400L  
オーバーテーブル**  
コードNo.21254-11

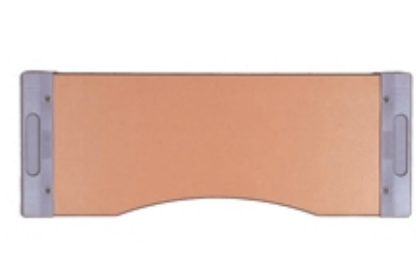

幅93cm×奥行35.5cm  
レンタル価格.....¥1,000  
利用者負担.....**¥100**

**K-135 オーバーテーブル**  
コードNo.21252-11

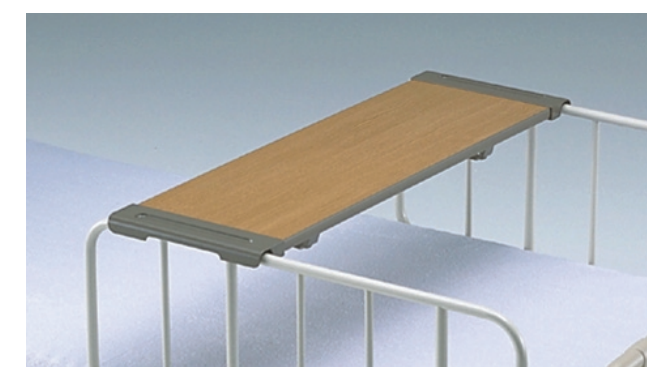

幅98cm×奥行30cm  
レンタル価格.....¥1,000  
利用者負担.....**¥100**

**ST-120 オーバーテーブル**  
コードNo.21251-61



幅104cm×奥行40cm  
レンタル価格.....¥1,000  
利用者負担.....**¥100**

## ベッドサイドテーブル

**KF-281 ベッドサイドテーブル**  
コードNo.21261-21



レンタル価格.....¥3,000  
利用者負担.....**¥300**

幅75cm×奥行  
30cm×高さ  
64.5～99.5cm  
支柱のつまみを  
ゆるめて高さ調  
整が可能です。  
(KQ86・KQ82シリ  
ーズには使えません)

**KF-192 ベッドサイドテーブル**  
コードNo.21261-19



レンタル価格.....¥3,000  
利用者負担.....**¥300**

幅80.7cm×奥  
行42cm×高さ  
63.5～92.5cm  
ガススプリングに  
より無段階に高  
さが調整できます。

## ベッドテーブル

**KF-813 オーバーベッドテーブル**  
コードNo.21258-15



レンタル価格.....¥3,000  
利用者負担.....**¥300**

幅121cm×奥行  
40cm×高さ63  
～95.5cm  
ノブボルトをゆる  
めて高さ調整が  
可能です。

**KF-833LC オーバーベッドテーブル**  
コードNo.21258-17



レンタル価格.....¥4,000  
利用者負担.....**¥400**

幅128.4cm×奥  
行40cm×高さ  
63～95cm  
テーブル移動ロッ  
ク機構付き

## スライディングボード

スライディングボードの使い方 (例) ベッドから車いすへ移乗する場合

【移乗する前に】

ベッドの足の位置を水平にします。  
車いすのアームレストとレッグレストを外してベッドにぴったりつけ、  
必ずロックしてください。  
ベッドの高さは、車いす座面より少し高く設定します。  
ご利用者の足をベッドから下ろし、腰掛ける姿勢にします。

【移乗します】

1)スライディングボードをご利用者のお尻の半分まで差し込み、もう片方は車いす座面に、  
スライディングボードの半分が車いす座面にしっかり乗っているか確認します。  
2)ご利用者の腰をしっかり持ち、体重をスライディングボードに乗せるようにしながら、  
車いす側に体を移動します。  
3)移乗がすんだら、スライディングボードを引き抜き、ご利用者の姿勢を整えましょう。



**イージーモーション**  
コードNo.  
21281-11



長さ78cm×幅38cm×厚さ0.5cm  
重さ:約1.8kg 材質:オレフィン系樹脂  
130～140kgの耐荷重。  
手軽に使えて、労力を軽減します。

レンタル価格.....¥1,000  
利用者負担.....**¥100**


**イージーグライドM**  
コードNo.  
21281-22



長さ60cm×幅33cm  
材質:オレフィン系樹脂  
～140kgの耐荷重。  
介助者の負担が  
少なく、移乗も  
ラクです。

レンタル価格.....¥1,000  
利用者負担.....**¥100**

**イージーグライドS**  
コードNo.  
21281-21

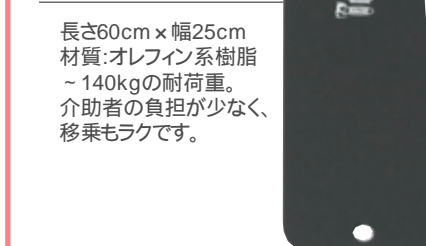

長さ60cm×幅25cm  
材質:オレフィン系樹脂  
～140kgの耐荷重。  
介助者の負担が少なく、  
移乗もラクです。

レンタル価格.....¥1,000  
利用者負担.....**¥100**