

スリングシート / 徘徊感知機器

スリングシート(販売品) スリングシートにはさまざまな種類があります。身体機能や体格、使用目的、使用環境に合ったものをお選びください。

スリングシートハーフタイプ



最大荷重:100kg
車いすに座ったままセット可能です。
首や体幹の支持力が比較的高い方向きです。

販売価格 (小) ¥ 39,375
(税込) (中) ¥ 40,950
(大) ¥ 45,675

スリングシートフルタイプ



最大荷重:100kg
車いすに座ったままセット可能です。
首や体幹の支持力が比較的低い方向きです。

販売価格 (小) ¥ 51,450
(税込) (中) ¥ 53,550
(大) ¥ 58,800

ベッド専用シートパオ(ハーフ)



最大荷重:100kg
あらかじめベッドに敷いた状態から吊り上げることができます。
首や体幹の支持力が比較的しっかりした方向きです。

販売価格(税込) ¥ 40,950
大中小兼用

トイレシート



最大荷重:100kg
素早く安全にトイレへ移乗できます。
首や体幹の支持力が比較的高い方向きです。

販売価格(税込) ¥ 51,975
大中小兼用

二本ベルト



着脱が簡単です。
比較的体幹のしっかりした方向きです。

販売価格(税込) ¥ 40,950
大中小兼用

種類

ベルト型

2本のベルトからなっており、装着が簡単です。
座位能力が十分にある方に使います。

脚分離型 / ローバック

背中までの丈のスリングシートです。
頭部保持力および座位能力がいくらかある方に適しています。

脚分離型 / ハイバック

頭部までカバーできるスリングシートです。
頭部の支持力が十分でない方でも使用できます。


脚分離型 / トイレ

お尻の部分が大きく空いているのが特徴です。
トイレや入浴の他、座位能力がある方の場合には車いすへの移乗などにも使用できます。

シート型

背中から脚にかけて、すっぽりと包むタイプのスリングシートです。
体の下全体に敷き込むため、車いす上での着脱はできません。

装着方法

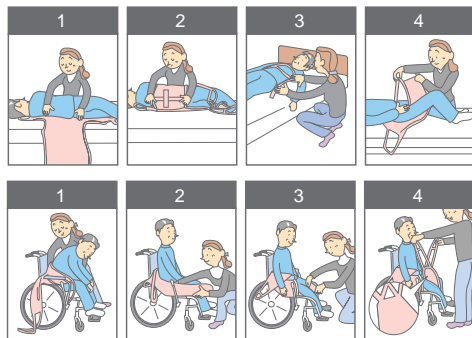

ベッド上の場合

1. お尻の位置に合わせます。
2. 背骨にスリングシートの中央を一致させます。
3. 手前側のスリングシートを引き出します。
4. 太股にくぐらせ、交差させます。

車いす上の場合

1. 背骨に沿って座面まで差し込みます。
2. お尻を十分におおいます。
3. 太股にくぐらせ、シワを伸ばします。
4. 左右の長さを確認し、交差させます。

徘徊感知機器

ワイヤレス徘徊感知機器

コードNo.21860-41・42・43



お年寄りが外出した時にセンサーが感知し、お知らせします。
受信機から専用メロディが鳴り、お知らせするのですぐにわかります。

受信機と送信機のセットでレンタルいたします。


徘徊お知らせシステム



レンタル価格 ¥12,000
利用者負担 **¥1,200**

徘徊感知機器(マット式)

コードNo.21860-40・44・46

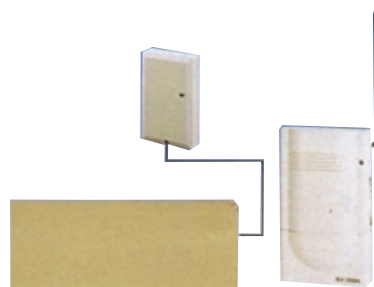

自重:2.7kg

幅60cm x 奥行43.5cm x 高さ70~80cm
重さ:2.7kg

お年寄りが外出した時にセンサーが感知し、お知らせします。
マットセンサ部と受信機間に小電力セキュリティ無線を使用するため、配線工事なしで設置できます。

受信機と送信機のセットでレンタルいたします。

レンタル価格 ¥9,000
利用者負担 **¥900**